

# COLDISEPT



## Sprej za grlo

### Uputstvo za upotrebu

Medicinsko sredstvo u obliku spreja koje se koristi kao podrška u tretmanu upale grla izazvane bakterijskom ili virusnom infekcijom.

**COLDISEPT Sprej za grlo** stvara zaštitni sloj na sluznici grla, štiteći je od fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja.

**COLDISEPT Sprej za grlo** pomaže u eliminaciji konstantnog osećaja nelagodnosti u grlu vlažeći suhu sluznicu grla, time vidno smanjujući simptome upale kao što su bol i peckanje.

Proizvod stvara zaštitni sloj gela koji štiti mukozne membrane usta i grla od bakterija i vrusa.

Vodeni rastvor mineralnih soli natriuma, kalijuma, kalcijuma i minerala soli i srebra agnezijuma u nanočesticama koje su sadržane u ovom proizvodu čiste grlo, smanjujući otok grla i nosne sluznice i pomaže u regeneraciji iritiranih membrana sluznice.

### SASTAV

Prečišćena voda, nanokoloidno srebro, ekstrakt Chondrus crispus (karagenana), sorbitol, glicerol, mineralne soli (kalijum dihidrogen fosfat, kalijum hlorid, natrijum hlorid, kalcijum hlorid heksahidrat, magnezijum hlorid heksahidrat) ulje mente, natrijum benzoat, limunska kiselina.

Proizvod sadrži nanočestice srebra koje ograničavaju rast bakterija. Ulje pepermint pomaže u čišćenju nosnih kanala, olakšava kašalj i pomaže olakšavanju disanja.

**Pakovanje: 20ml**

### INDIKACIJE

**COLDISEPT Sprej za grlo** efikasno pomaže tretmanu:

- upale mukoznih membrana usta u grla
- upale krajnika
- stanje nakon uklanjanja krajnika.

### NEŽELJENI EFEKTI

Neželjeni efekti **COLDISEPT Spreja za grlo** nisu poznati, međutim kod posebno osetljivih osoba, alergijske reakcije ne mogu biti isključene.

Ukoliko se javi alergijska reakcija, treba prestati sa korišćenjem proizvoda.

## DODATNE INFORMACIJE I MERE OPREZA

Ne koristite proizvod ukoliko ste alergični na bilo koji od sastojaka.

Ne koristite proizvod ukoliko ste alergični na srebro.

Sprečite da dođe do kontakta sa očima.

Prekinite sa korišćenjem proizvoda u slučaju bilo kakvog alarmantnog simptoma.

Ne koristite nakon isteka roka upotrebe!

Trudnice i deca ispod 6 godina mogu da koriste proizvod samo pod medicinskim nadzorom.

Proizvod može biti korišćen duži vremenski period bez rizika od zavisnosti, neželjenih efekata ili komplikacija.

Bilo koji ozbiljni incident koji se javio u vezi sa medicinskim sredstvom treba da bude prijavljen proizvođaču i nadležnom organu zemlje u kojoj pacijent živi.

## UPOTREBA I DOZIRANJE

Proizvod koristite 3-4 puta na dan, u zavisnosti od individualnih potreba.

Pritisnuti dispencer nekoliko puta pre prve upotrebe.

Postavite aplikator što dublje moguće u usta i usmerite u pravcu grla.






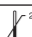
Aplicirajte 3-4 doze (pritiska pumpice).

## ČUVANJE

Čuvati na temperaturi do 25°C, na suvom mestu, dalje od domašaja dece.

Pakovanje od 20ml

### Značenje simbola:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | Broj serije                    |
|  | Rok upotrebe                   |
|  | Pročitati uputstvo za upotrebu |
|  | Datum proizvodnje              |
|  | Proizvođač                     |
|  | Temperaturno ograničenje       |

Uputstvo za upotrebu izdato: 01.09.2020.

 **Proizvođač: ARKONA**  
**Laboratorium Farmakologii**  
**Somatologicznej, Nasutów 99C,**  
21-025 Niemce, Poljska

**Ovlašćeni predstavnik**  
**proizvođača:**

Alpen Pharma d.o.o. Ulcinjska 13,  
sprat 4, stan 10, 11050 Beograd  
[Zvezdara], Republika Srbija



**Proizvedeno u EU za:**  
**Alpen Pharma AG,**  
Bern, Switzerland



**Rešenje o registraciji:**

515-02-00353-21-006 od 01.02.2022.